


MONITOR DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN (TEC-5531)

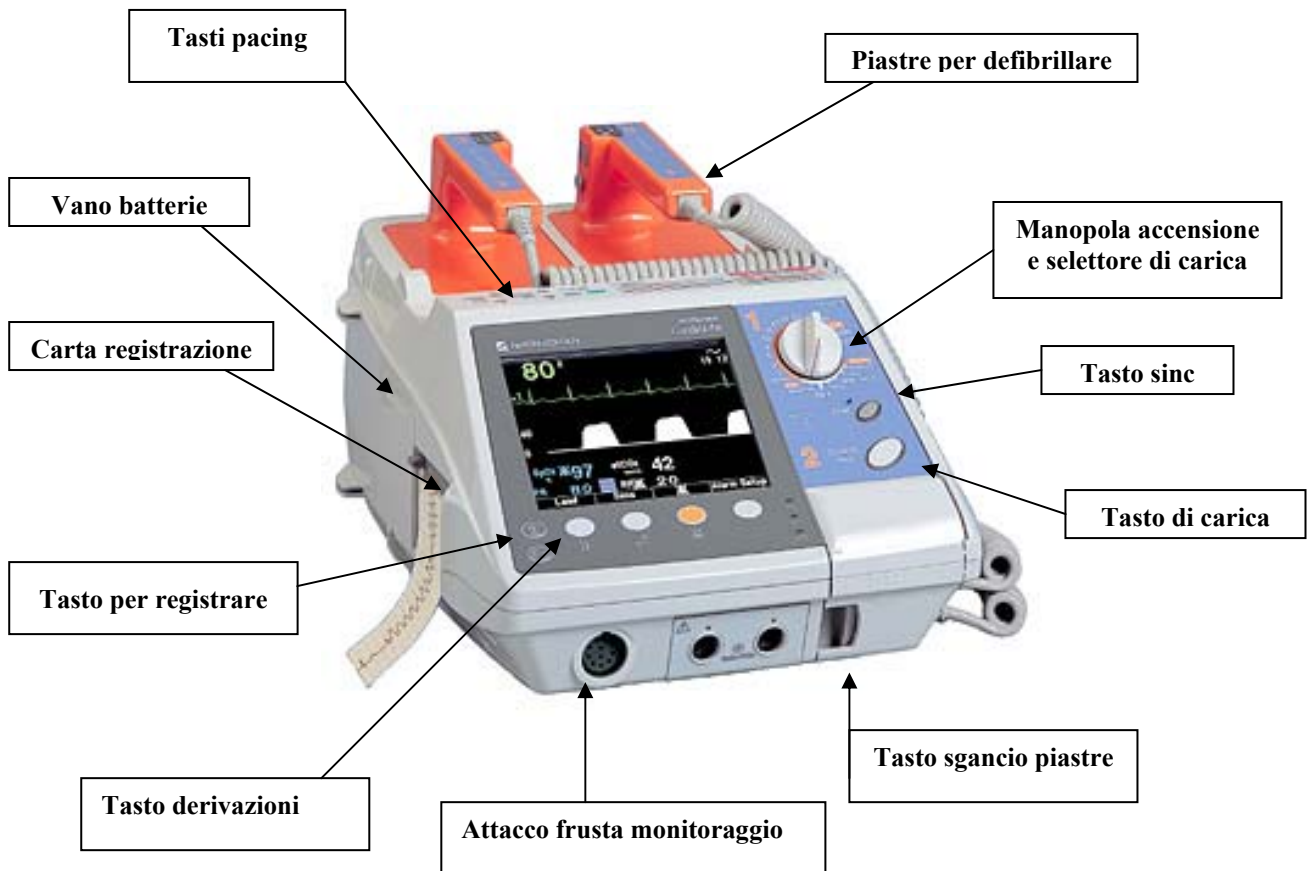

Il monitor – defibrillatore consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Pronto monitoraggio del ritmo cardiaco (tramite le piastre)
- Monitoraggio continuo del ritmo cardiaco (tramite frusta a tre derivazioni)
- Defibrillatore manuale (1 regola carica – 2 carica – 3 scarica) – *prima della defibrillazione deve essere applicato il gel conduttore sulle piastre.*
- Defibrillatore semiautomatico (DAE) (tramite piastre adesive monouso da sostituire alle piastre)
- Può effettuare operazioni di pacing cardiaco.(tramite piastre adesive monouso da sostituire alle piastre).

Il tasto **derivazioni** permette di passare sequenzialmente da: PIATTELLI – D1 –D2 – D3 – AUX

Il tasto **registra** permette di stampare il tracciato (per fermarlo premere nuovamente il pulsante)


Il tasto **sinc** permette la defibrillazione in modo sincrono.

L'apparecchio funziona a batterie ricaricabili (230 v) per metterlo in carica occorre attaccare lo spinotto nella parte posteriore.


Prova funzionamento defibrillatore:

- Posizionare la manopola su verifica base
- Seguire le istruzioni della voce registrata

Il monitor defibrillatore può anche utilizzare la funzione pacing cardiaco, in questo caso è necessario sostituire le piastre con quelle monouso adesive. Per far questo è necessario staccare il cavo posto anteriormente al defibrillatore e sostituirlo con il raccordo (posto nella sacca laterale dello zaino) una volta inserito il raccordo(vedi foto sotto) attaccare il cavo delle piastre monouso. Successivamente accendere il monitor nella posizione *fisso* o *demand* a seconda della richiesta del medico.

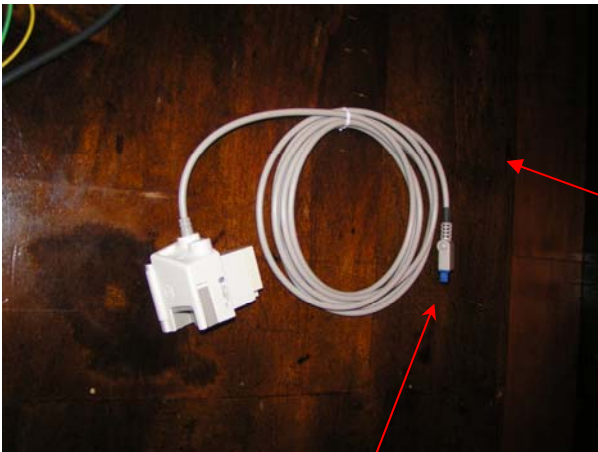


Raccordo per piastre monouso per pacing.

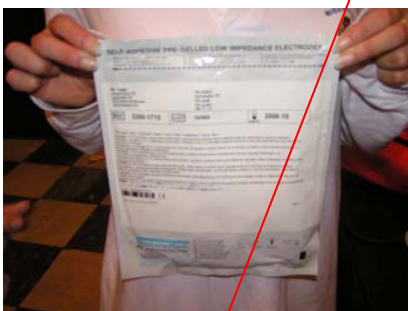

Confezione piastre monouso (aprire solo se necessario)

Una volta aperta la confezione troverete un cavo (foto a lato), da una parte termina con le piastre adesive, che vanno attaccate al paziente. (attenzione ad eventuale peluria toracica), dall'altra parte termina con un raccordo che va raccordato al cavo per pacing. Le piastre devono essere aperte solo se necessario su richiesta del medico, e sono monouso.

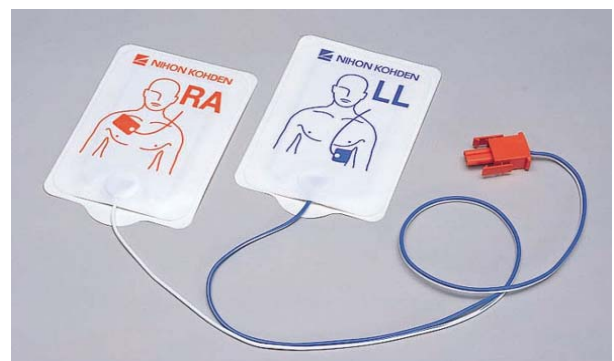


SOSTITUZIONE DELLA CARTA NEL MONITOR

1



2

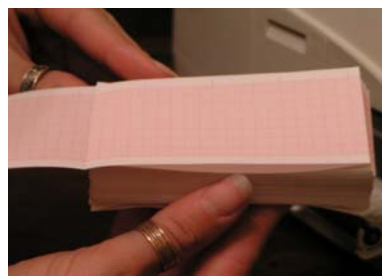

3



4



La carta del monitor si presenta come un panetto, per sostituirla dobbiamo effettuare quattro passaggi:

1. Aprire lo sportellino tramite il tasto grigio posto sopra. (FOTO 1)
2. Aprire la confezione di carta e posizionarla con la parte millimetrata verso l'alto. (FOTO 2)
3. Inserire la carta nel vano(FOTO 3) facendo attenzione che un lembo resti fuori dallo sportellino.(FOTO 4).
4. Chiudere lo sportellino.

MODALITA' DAE

Il monitor può anche funzionare in modalità semiautomatica, questa funzione è riservata a personale sanitario, per poter utilizzare questa funzione dobbiamo procedere per fasi:

1. Rimuovere le piastre e inserire il cavo di raccordo (lo stesso del pacing)
2. Mettere la manopola di accensione sulla posizione DAE.
3. Attaccare le piastre monouso al raccordo(stessa procedura del pacing).
4. Seguire le indicazioni della voce registrata.